



Velpeau® Ceinture de soutien lombaire

Vertélibre



Lombalgies (mal de dos)

Activités professionnelles
Travaux domestiques

Rappel postural dynamique

- + 2 sangles de contention élastiques permettant d'assurer un bon soutien lombaire selon le degré d'activité pratiqué.
- + Ouverture et fermeture facilitées par passe mains « Velpeau lock »
- + Découpe spéciale, couverture du bas du dos.
- + Dosseret élastique muni de quatre baleines rigides.
- + **Baleines double cambrures.**
- + Couloirs velours antidérapant.
- + Tissu élastique fort et résistant en coton.
- + Velcro élastique (+souple, +confortable)

+ Echancrure améliorant le confort en position assise.


Faible hauteur abdominale (libère les côtes)






L'étude concerne 63 patients lombalgiques.
L'objectif principal était de mesurer la réduction de l'intensité de la douleur au bout de 7 jours de port de façon discontinue ou temporaire ; l'intensité de la douleur étant évaluée par le patient au moyen d'une échelle classique de mesure de l'intensité de la douleur, cotée de 0 à 10.

Les objectifs secondaires étaient d'évaluer la tolérance (désagréments lors du port) et d'apprécier le confort, la facilité d'utilisation et la qualité du produit (excellent / bon / moyen / insuffisant

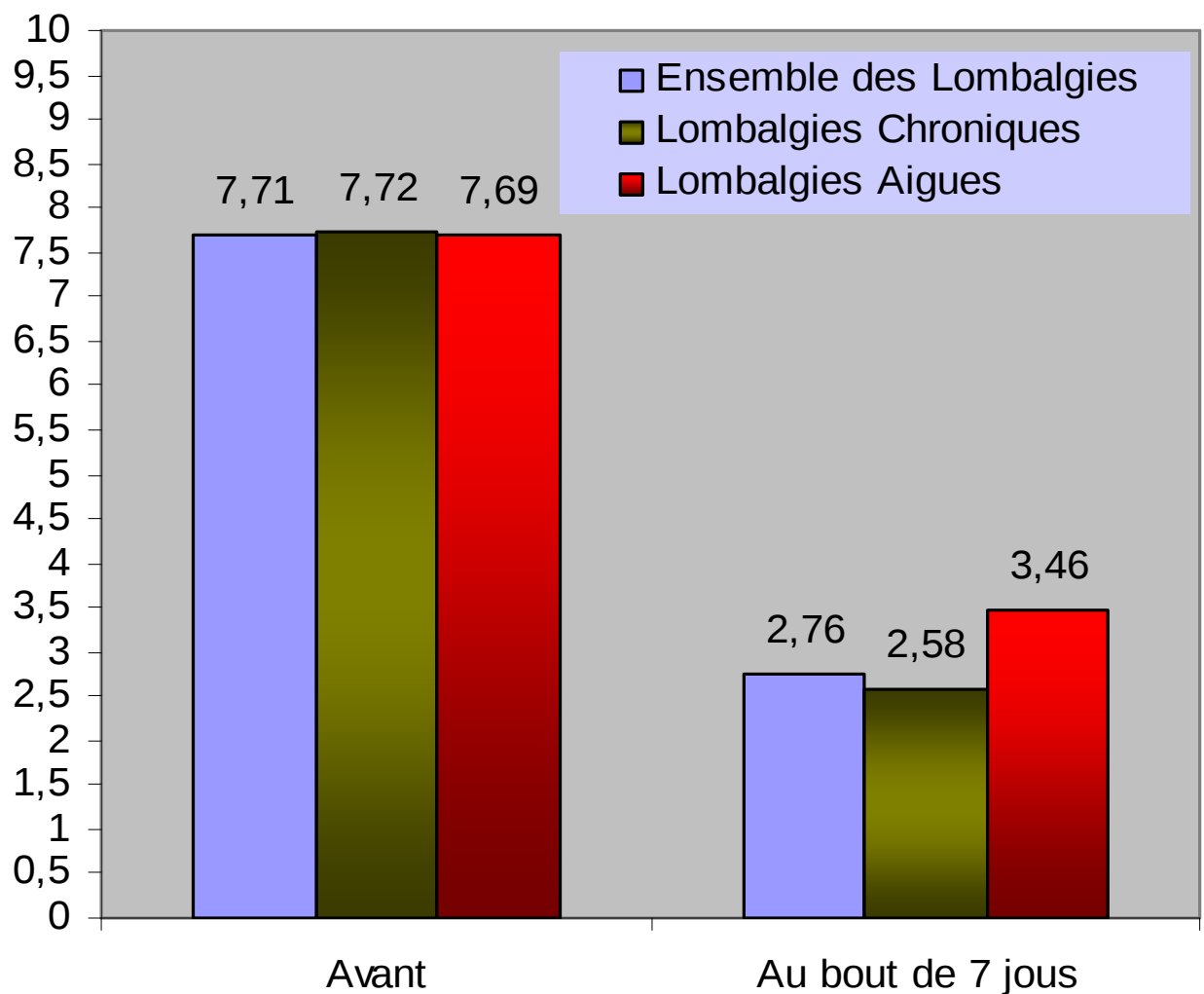

Effets antalgiques J7/J0

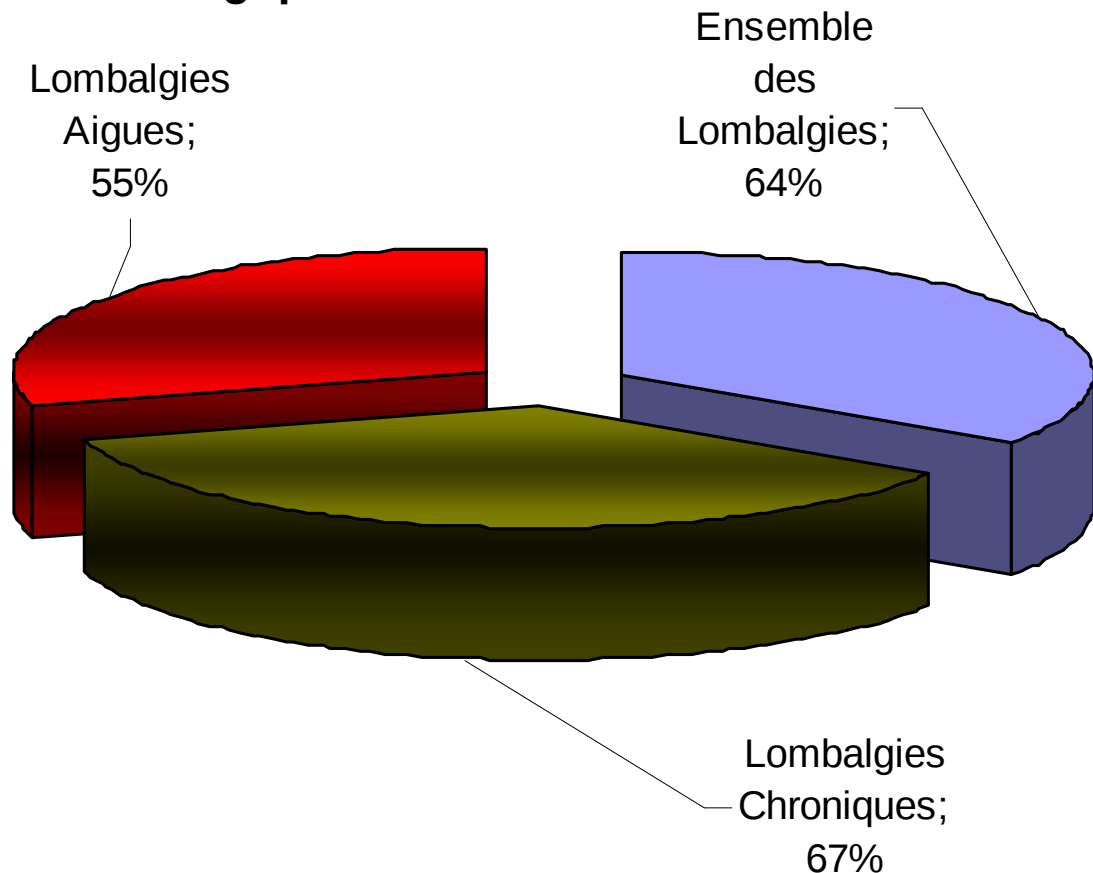

Paramètres secondaires

La tolérance du port de Vertélibre® Jean's (absence de désagréments) est excellente dans 89% des cas.

Outre une utilisation appréciée à 95% comme facile, son confort se situe à un taux de 94% de patients satisfaits.

De plus, 98% des lombalgiques ont apprécié la qualité du produit comme bonne ou excellente.